

# KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test  
 Hersteller: Siemens Healthineers

## Erste Schritte

**1** Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)

**2** 10 Tropfen (0,3 ml) Pufferlösung einfüllen

10 x

## Probennahme (bei Zimmertemperatur)

**3** Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2-4 cm einführen, fünfmal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen

5 x

## Behandlung der Probe

**4** Abstrichtupfer einführen und mindestens sechsmal drehen und gegen die Seiten des Röhrchens drücken

mind. 6 x

**5** Abstrichtupfer eine Minute im Röhrchen stehen lassen

**6** Röhrchen mehrmals gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen

Anschließend Abstrichtupfer entnehmen und Tropfkappe fest aufsetzen

**7** Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

**8** Ergebnis nach 15 min ablesen

4 x

**9** Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

## Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

**Negativ**  
 Farbige Kontrolllinie (C)

**Positiv**  
 Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

**Ungültig/unklar**  
 Keine Kontrolllinie (C)

## Entsorgung

Verwendete Testkits isoliert im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen

Test mit neuem Material wiederholen